



Instruções de Uso

Produto: Cateter de Alto Fluxo Biometrix

Indicação de uso:

Os conjuntos de cateter de alto fluxo Biometrix são projetados para infusão de sangue de veias do sistema central ou outros fluidos na sala de emergência. O acesso pode ser feito através da veia jugular, femoral e subclávia. Os pontos de inserção estão identificados no desenho anexo a este formulário.

Contra-indicações

NA

Instruções de uso:

O Médico deve estar familiarizado com a técnica de Seldinger, uso e as complicações da subclávia, jugular, femoral ou qualquer procedimento de punção venosa.

1. Prepare o local da punção de maneira normal.
2. O fio-guia, se desejado, pode ser lavado com heparina através da proteção do tubo.
3. Uma agulha de 20ga / 22Ga pode ser usada para injetar anestésico local (não incluído no conjunto).
4. Faça perfuração na veia utilizando uma seringa de 5 ml (não fornecida neste sistema) e agulha de 18 Ga (para bom fluxo verificar colocação da ponta da agulha dentro do vaso).
5. Endireitar a ponta "J" do fio guia e remova o fio guia de tubo de proteção. Inserir o fio guia através da agulha de introdução para dentro do vaso, até à distância desejada. O avanço da ponta "J" pode exigir um movimento de rotação suave.

Cuidado: Não retirar o fio-guia através da agulha para evitar um possível rompimento do fio guia.

6. Manter a posição do fio guia e retire cuidadosamente a agulha.
7. Monte os fios da unidade da bainha /dilatador sobre fio-guia e avançar para perfurar o local. Ampliar o local com uma pequena abertura, se necessário, inserir unidade bainha / dilatador no recipiente com um ligeiro movimento de rotação.
8. Remova o dilatador e o fio-guia deixando a bainha no vaso.
9. Suturar a bainha no local usando presilha de sutura .

Cuidado: Não coloque sutura no bainha do tubo, pois isso pode restringir o fluxo ou danos ao tubo.

10. Seguir o protocolo hospitalar para cobrir e manter local da punção.

Precaução: Mantenha o local de inserção com reparo meticuloso usando uma técnica asséptica.

AVISOS

- Deverá ser tomado cuidado durante a inserção, remoção ou a utilização do dispositivo para evitar a aspiração de ar para dentro dos vasos sanguíneos.
- Inspeção a embalagem e produto para danos antes de usar. Não use se a embalagem estiver danificada.
- Aperte todas as conexões antes do uso, sem excesso de aperto.

Advertências:

O Médico deve estar familiarizado com a técnica de Seldinger, uso e as complicações da subclávia, jugular, femoral ou qualquer procedimento de punção venosa.

Deverá ser tomado cuidado durante a inserção, remoção ou a utilização do dispositivo para evitar a aspiração de ar para dentro dos vasos sanguíneos.

Precauções:

Este produto deve ser utilizado apenas por pessoal técnico treinado.

Mantenha o local de inserção com reparo meticolosa usando uma técnica asséptica.

Aperte todas as conexões antes do uso, sem excesso de aperto.

Inspeção a embalagem e produto para danos antes de usar. Não use se a embalagem estiver danificada.

Armazenamento e transporte:



Instruções de Uso
Produto: Cateter de Alto Fluxo Biometrix

O produto deve ser armazenado e transportado em local seco e fresco.

Este produto é estéril, esterilizado por ETO pronto para uso.

Validade 5 anos

Proibido reprocessar.

Embalado em caixa com 10 unidades.

Fabricante: Biometrix Ltd.

End: Kiryat Mada, 4. CEP: 91450. Jerusalém, Israel

Importador: QR Consulting, Importação e Distribuição de Produtos Médicos Ltda

Rua Ministro Orozimbo Nonato, 442/511-512. Vila da Serra. Nova Lima – MG. CEP: 34006-053

Responsável técnica: Maria José Barbosa Duarte CRFMG: 10334

ANVISA: 81325990021